



Ficha Técnica

Lanceta Estéril

Producto

Lanceta Estéril/ Steril Lancets

Marca

M&H Care

Descripción del Producto

La Lanceta Estéril de M&H Care para uso individual es una especie de lanceta tradicional que puede ser utilizado con el dispositivo de punción. El cuerpo de aguja y la aguja de acero del producto de lanceta se forman a través del método de alta temperatura una vez moldeado.

Indicaciones de Uso

La lanceta estéril de un solo uso se utiliza principalmente para recolectar sangre de las partes periféricas del cuerpo humano para análisis de sangre. Es conveniente y seguro usar este producto para análisis de sangre y prueba de diabetes y los pacientes solo sentirán un poco de dolor; el producto es inteligente, práctico, fácil de usar, etc.

- Para uso profesional en entidades de salud.
- Extracción de sangre capilar.

Contraindicaciones

- No usar si en la zona de punción existe infección
- No usar si en la zona de punción existe inflamación

Calle 48 # 24-60 Barrio Sotomayor Bucaramanga / Cel. 305 259 8264 Tel. 607 647 8100

Carrera 25 # 37-34 Barrio Bolívar Bucaramanga / Cel. 316 824 0597 Tel. 607 687 9383


Calle 19 # 26-08 Barrio Santacruz Girón / Cel. 315 895 0855

e-mail: insumeds@hotmail.com

Santander, Colombia

Accesorios

- La lanceta M&H Care tiene una aguja moldeada por inserción en un entorno plástico que consiste en una tapa y un cuerpo.
- La aguja es afilada en el extremo para penetrar en la piel.

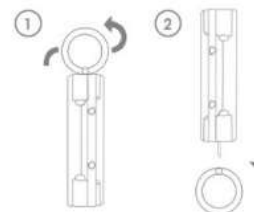

Componentes Principales

- Aguja: Acero inoxidable.
- Tapa Protectora: Polietileno de baja densidad.
- Mango / Empuñadura: Polietileno de baja densidad.

Advertencias

- Las lancetas son de un solo uso. No reutilizar.
- No utilice las lancetas para obtener muestras de sangre de otras personas.
- No usar si el sello de seguridad está roto.
- No utilice la lanceta si se presenta sin tapón protector.
- Utilícelo tan pronto como se abra y recuerde destruirlo después.
- No almacene después de su uso. Utilice el contenedor de objetos cortopunzantes para desechar lancetas y tiras reactivas.

Especificaciones Técnicas

- Fabricado en Polietileno de baja densidad.
- Esterilizado por Óxido de Etileno.
- No Tóxico.
- Libre de Pirógenos.

Presentación comercial

- Caja x 50 Unidades
- Caja x 100 Unidades

Condiciones de Almacenamiento

- Mantener en su empaque original.
- Condiciones ambientales: Máximo 30°C de temperatura.
- Evite la exposición directa a la luz solar.

Vida Útil

La lanceta estéril M&H Care tienen una vida útil de 5 años, siempre y cuando se cumplan las condiciones de almacenamiento.

Normas Técnicas de Referencia

Este producto cuenta con estándares de calidad en ISO 13485 SGC Dispositivos Médicos.

Clasificación de Riesgo: IIA.