

ELECTRODOS CARBONADOS 6 x 9 cm

Electrodos rectangulares de goma negra de doble capa



Conector de 2 mm

Tips de cuidado

1. Almacenar los electrodos en el refrigerador desde que la compra y después de cada uso, ayuda a mantener "fresco" el adhesivo.
2. Antes de cada uso, limpiar bien la piel, asegurándose que no tenga ningún tipo de humectante (cremas o aceites) y que esté seca.
3. Después de cada uso, colocar los electrodos en su empaque original y cerrando bien la bolsa donde se guarden, de preferencia debe ser una bolsa con cierre. No olvidar volverlos a almacenar en el refrigerador.
4. Es recomendable que si se comparte el equipo de electroterapia, cada usuario tenga su juego de electrodos, así podrán maximizar los usos, además de que es un buen hábito de higiene.

Instrucciones de uso

Están diseñados para usarse como una interfaz adhesiva conductora entre la piel del paciente y el electroestimulador.

Contraindicaciones

No utilice electrodos para la estimulación en piel lesionada, si tiene marcapasos cardiaco, placa metálica o dispositivo electrónico; podría causar quemaduras por descargas eléctricas, interferencia eléctrica o muerte.

Instrucciones

Antes de usar, aplique suficiente medio conductor para cubrir toda la superficie del electrodo, también puede usarse con almohadillas, las cuales deben permanecer bien humedecidas durante el tratamiento. Use un solo medio conductor aprobado específicamente para electroterapia. Coloque los electrodos en el paciente, y aplique una envoltura elástica al rededor del electrodo para asegurarlo en su lugar. No use un medio con ningún contenido a base de alcohol.

Especificaciones del producto

Rectangular
Reutilizables
Goma negra de 6 x 9 cm
Conector de 2mm, cable de cobertura fiabilidad, durabilidad y dispersión total de la corriente
4 unidades por paquete sellado en una bolsa plástica

Item	ER2535B2
Referencia	Electrodo carbonado
Cantidad	4 / PK